

RESPIRADOR N95: REUTILIZACIÓN LIMITADA QUITAR, ALMACENAR Y RECUPERAR

Equipo de protección personal (EPP)

Suministros necesarios:



Respirador N95



Bolsa de papel con asideros

Los centros de atención de la salud deben elaborar procedimientos claramente escritos específicos para su instalación. Los fabricantes de respiradores N95 pueden tener una guía específica con respecto a la reutilización de su producto y se les debe consultar antes de desarrollar procedimientos específicos para la instalación. Consulte "[Riesgos del uso extendido y la reutilización de los respiradores.](#)"

Quitar

1

Desinfecte los guantes.*

2

Pellizque la goma (tirante) inferior y estírela sobre la cabeza.

3

Pellizque la goma (tirante) superior y estírela sobre la cabeza.

No permita que las gomas (tirantes) toquen su cara al quitarse el respirador.

4

Coloque y sostenga el N95 boca abajo

Almacenar

5

Coloque la bolsa de almacenamiento en una superficie limpia y plana.

6

- Coloque el N95 boca abajo en la bolsa de almacenamiento.
- La bolsa debe estar **marcada** para que otra persona no use el respirador.

7

Desinfecte los guantes.*

Recuperar

8

Desinfecte los guantes.*

9

La bolsa debe **desecharse** después de **recuperar** el respirador

Retire el N95 de la bolsa de almacenamiento.

10

Póngase el N95, asegurándose de **sellarlo** de manera adecuada. Asegúrese de que las gomas (tirantes) **no se crucen**.

11

Desinfecte los guantes.*

*Es importante que siempre confirme que su desinfectante es compatible con su EPP. Si no está seguro, haga una prueba primero o consulte a su especialista en EPP. Un desinfectante incompatible puede comprometer la integridad de su EPP.