


Instrucciones para tiras reactivas de detección de xilacina


(Xylazine Test Strip Instructions)

Instrucciones para la prueba de detección en pastillas y sustancias en polvo. ¡Siempre haga la prueba de detección antes de consumir sustancias! Las tiras reactivas de detección de xilacina solo deben utilizarse en opioides.

1 Lo que necesitará

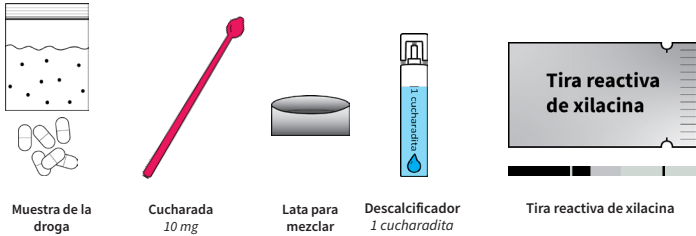


2 Preparación de la mezcla

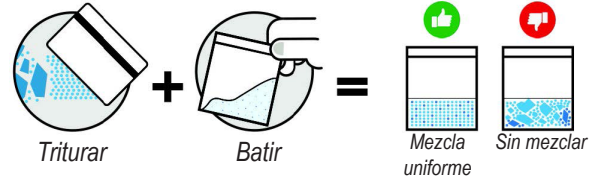

Antes de la prueba de detección, asegúrese de mezclar bien las drogas. La xilacina puede amontonarse en una parte de la muestra, lo cual puede brindar resultados inexactos de la prueba si no se mezcla bien.


3 Mediciones y diluido

1. Cucharada y dilución.
1 cucharada + 1 cucharadita de agua
2. Revuelva.
Asegúrese de que la muestra de droga y el agua se mezclen bien.

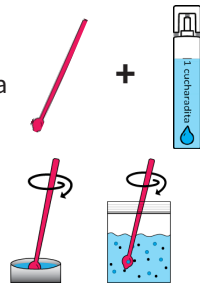


4 Uso de la tira reactiva

1. Sostenga la tira reactiva en la mezcla durante 15 segundos.
2. Coloque la tira reactiva en una superficie plana durante 3 minutos.

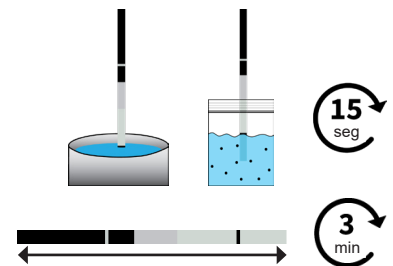

5 Interpretación de los resultados

Lea los resultados:

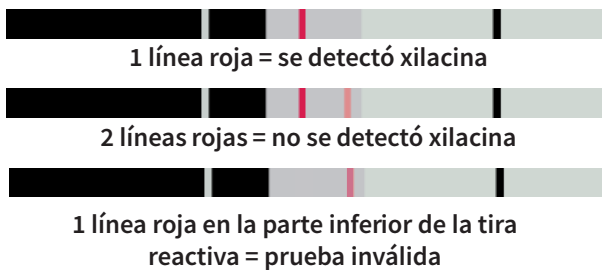

1. Una sola línea arriba **después de una espera de tres minutos**, es un resultado **POSITIVO** de presencia de xilacina.
2. Dos líneas rojas es un resultado **NEGATIVO**. La línea roja inferior puede ser mucho más clara que la superior. **Si después de esperar tres minutos, percibe una línea inferior roja, no importa qué tan clara sea, el resultado es negativo.**
3. Si ve solo una línea roja o ninguna línea abajo, el resultado es no válido. A menudo, esto sucede porque el líquido no se desplazó hasta donde debía en la tira.

IMPORTANTE: NO lea los resultados antes de que transcurran 3 minutos ni después de que transcurran 10 minutos.

6 Qué puede hacer si encuentra xilacina en la muestra

- No use la droga.
- Tenga a mano **naloxone**.
- En caso de sobredosis, llame al 911, administre naloxone y dé respiración de rescate hasta que llegue el auxilio.
- Use menos y proceda despacio.
- Úsela junto con otros y túrnense.
- Llame al **Never Use Alone: 877-696-1996**.

